



PERFECTCOLL™

INSTRUKCJA OBSŁUGI

# PC EYE GOLD 24 K

Efekt odmłodzonych oczu





# Spis treści



24 karatowe złoto najwyższej próby	4
Zalecane kosmetyki	6
Budowa i dane techniczne	10
Sposób użycia	12
Efekty odmładzania	14
Wskazania i przeciwwskazania	18
Pielęgnacja i konserwacja	19

# 24 karatowe złoto najwyższej próby




24 karatowe złoto użyte w **PC EYE GOLD 24 K** jest według naukowców bardzo stabilnym materiałem. Podczas tarcia i podgrzania wydzielają się jony ujemne, które przenikają w głębsze warstwy skóry.

Jony ujemne emitowane przez **PC EYE GOLD 24 K** wychwytyją wolne jony dodatnie w organizmie ludzkim i dzięki temu neutralizują je. W ten sposób przeciwdziałają wolnym rodnikom w komórkach, przywracają w organizmie równowagę oraz pobudzając jony we krwi, usprawniają jej przepływ.

Cyrkulacja krwi poprawia się, tempo metabolizmu usprawnia się, a głębiej położone warstwy skóry są stymulowane. Procesy te zawdzięczamy „właściwości regeneracyjnej” złota. Czyste jony złota są również nazywane aktywnym złotem. Jony złota mogą być wchłaniane przez skórę wraz z kosmetykiem.

Dzięki urządzeniu **PC EYE GOLD 24 K** uzyskasz efekt odmłodszonej skóry wokół oczu, rozświetlisz cienie, zredukujesz zmarszczki. Twoje spojrzenie będzie promienne i młodzieńcze.



Życzymy satysfakcji  
z użytkowania naszych  
produktów.

Zarząd, Komitet Naukowy i Pracownicy Perfect Coll Sp. z o.o.

# Zalecane kosmetyki

Używaj **PC EYE GOLD 24 K** jedynie z oryginalnymi kosmetykami PERFECT COLL



1

Przed zabiegiem

## PC DETOKSYKACYJNY EKSTRAKT Z DZIKIEGO CHABRA NORWESKIEGO

Najczystszy i najnowocześniejszy, całkowicie naturalny ekstrakt z kwiatów chabru pozyskanego z ekologicznych upraw w Skandynawii, wzbogacony o naturalne enzymy z Organic Kelp (organiczna alga). Delikatnie oczyszcza i łagodzi wrażliwą skórę twarzy, dekoltu i całego ciała. Nie zawiera parabenów, konserwantów chemicznych oraz wysuszającego skórę alkoholu.



2

W trakcie zabiegu

## PC PREBIOTYCZNE SERUM HIALURONOWE

Innowacyjna i całkowicie naturalna formuła prebiotyczna oraz niezwykle skuteczna proporcja różnych wielkości cząstek kwasu hialuronowego powodują głębokie nawilżenie odwodnionych lub przesuszonych warstw skórnych. Ze względu na zawartość niepowtarzalnych enzymów prebiotycznych, serum w doskonały sposób pielęgnuje najbardziej wymagającą skórę. Jest to JEDYNY prebiotyczny produkt na rynku, który cechuje się niezwykle wysoką wchłanianością.

## SYMBIOZA NAUKI Z NATURĄ

Kosmetyki PERFECT COLL posiadają unikalne, innowacyjne formuły opracowane w biotechnologicznych, proekologicznych laboratoriach polskich uniwersytetów medycznych. Jesteśmy pasjonatami natury i ekologii, dlatego kosmetyki ze znakiem PC są zdrowe dla Twojej skóry.



**3**

Po zabiegu

### PC KOLAGEN PLATYNOWY +32°C HIALURON

Polska słynie z produkcji najczystszej i najlepszej na świecie kolagenu idealnie przyswajalnego przez ludzki organizm. Nasz kolagen, dzięki unikalnej technologii posiada wyjątkową wytrzymałość temperaturową do +32°C. Jako jedyny produkt na rynku może nosić w pełni uprawnioną nazwę Platynowy, ponieważ zawiera w sobie nanocząstki platyny. Platyna ułatwia wnikanie substancji biologicznie czynnych do głębokich warstw skóry, optymalizując działanie kwasu hialuronowego wchodzącego w skład preparatu. Doskonała kompozycja 3 aktywnych składników kwasu hialuronowego w sposób rewelacyjny wzmacnia efekt po zabiegu z zastosowaniem **PC EYE GOLD 24 K**.

**4**

Po zabiegu

### PC PREBIOTYCZNY KREM ŁAGODZĄCY

Naturalny i ekologiczny, innowacyjny krem łagodzący, który ze względu na unikalny skład posiada niezwykle właściwości wspomagające pracę uszkodzonych komórek skóry. Jego składniki odpowiedzialne są za regenerację nawet najbardziej delikatnej skóry, enzymy z owocu papai przynoszą efekt lekkiego rozświetlenia. Jest to jedyny produkt na rynku, który zawiera w składzie enzymy prebiotyczne, co zapewnia mu niezwykle wysoką wchłanianiałość.



Kosmetyki PERFECT COLL nie zawierają parabenów, konserwantów chemicznych, pochodnych ropy naftowej (parafina), olei mineralnych oraz wysuszających skórę alkoholi i glikoli, a także drażniącego środka pianiącego Sodium Laureth Sulfate i innych chemicznych, szkodliwych dla skóry substancji.

Szczegółów szukaj w "Katalogu produktów Perfect Coll"



# Budowa i dane techniczne PC EYE GOLD 24 K



## DANE TECHNICZNE

URZĄDZENIE:	
Nazwa produktu	PC EYE GOLD 24 K
Wymiary	94.97 x 18.76 x 15.2 mm
Waga	19 g

# Sposób użycia PC EYE GOLD 24 K



## PROSTE KROKI STOSOWANIA PC EYE GOLD 24 K:


- Wykonaj demakijaż.
- Przemyj twarz **PC DETOKSYKACYJNYM EKSTRAKTEM Z DZIKIEGO CHABRA NORWESKIEGO**.
- Nałóż odpowiednią ilość **PC PREBIOTYCZNEGO SERUM HIALURONOWEGO** pod oczy wykorzystując węższy koniec łyżeczki.
- Następnie użyj głowicy z 24 karatowym złotem. Powoli przesuwaj od skroni do wewnętrznego kącika oka, po łuku brwiowym, zataczając okręgi.
- Po zakończonym zabiegu przemij ponownie twarz **PC DETOKSYKACYJNYM EKSTRAKTEM Z DZIKIEGO CHABRA NORWESKIEGO**.
- Następnie nałóż **PC KOLAGEN PLATYNOWY +32 °C HIALURON** i wykonaj masaż.
- Po zabiegu nanieś na twarz **PC PREBIOTYCZNY KREM ŁAGODZĄCY**.
- Wyczyść złotą łyżeczkę (*Rozdz. Pielęgnacja i konserwacja*).
- Odłóż **PC EYE GOLD 24 K** do pudełka.



Częstotliwość zabiegu:  
Codziennie



Czas zabiegu:  
10 min

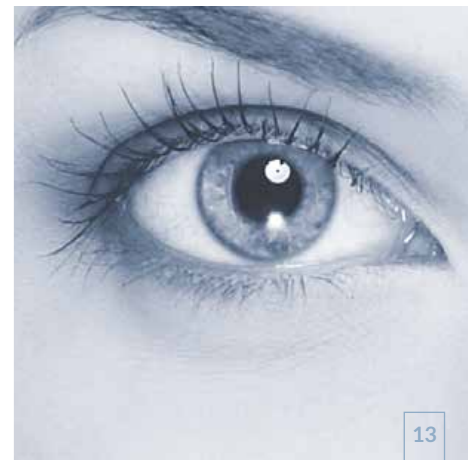

# Efekty odmładzania

- Zapobiega opuchliznom wokół oczu, poprawia mikrokrażenie krwi, usuwa cienie pod oczami
- Spłyca zmarszczki
- Działa przeciwstarzeniowo i odmładzająco
- Działa antybakteryjnie
- Masuje



## **ZAPOBIEGANIE OPUCHLIZNOM OCZU, POPRAWA MIKROKRAŻENIA KRWI, USUNIĘCIE CIENI POD OCZAMI.**

**PC EYE GOLD 24 K** poprawia mikrokrażenie krwi i limfy, co powoduje, że znikają cienie pod oczami a opuchnięcia zmniejszają się. Dzięki temu błyskawicznie osiągamy efekt rozjaśnionej i odmłodzonej skóry wokół oczu.

## **SPŁYCANIE ZMARSZCZEK**

**PC EYE GOLD 24 K** emituje czyste jony złota, które pobudzają proliferację kolagenu, co powoduje błyskawiczną regenerację skóry. Dzięki temu struktura zniszczonych z wiekiem włókien kolagenowych zostaje odbudowana. Efektem tego procesu jest zdecydowane spłykanie zmarszczek i odmłodzenie skóry.



## DZIAŁANIE PRZECIWSTRARZENIOWE I ODMŁADZAJĄCE

Głowica **PC EYE GOLD 24 K** emituje czyste, ujemne jony złota. Jony przenikają w głąb skóry i neutralizują jony dodatnie w ludzkim ciele, co powoduje eliminację wolnych rodników w komórkach, pobudzenie krążenia krwi, usprawnienie metabolizmu, dzięki czemu skóra zachowuje młody wygląd przez bardzo długi czas.

## DZIAŁANIE ANTYBAKTERYJNE

**PC EYE GOLD 24 K** posiada właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne.

## MASAŻ

Stosowanie **PC EYE GOLD 24 K** do masażu poprawia krążenie krwi i metabolizm komórkowy w skórze.



# Wskazania

- Zastoje limfatyczne.
- Skóra starzejąca się.
- Skóra ze skłonnościami do zanieczyszczeń.
- Obrzęki i cienie pod oczami.
- Zmarszczki w okolicach oczu, a w szczególności „kurze łapki”



# Przeciwwskazania

- Poparzona skóra słońcem (w miejscu zabiegu).
- Przerwanie ciągłości naskórka (w miejscu zabiegu).
- Zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze (w miejscu zabiegu).
- Świeże blizny, znamiona i tatuaże (w miejscu zabiegu).
- Poważne egzemy, łuszczyca, skóra atopowa, trądzik różowaty (aktywne wykwity w miejscu zabiegu).
- Uczulenie na skład kosmetyków zawartych w preparatach.
- Poddanie się w ostatnich 6 miesiącach operacjom (w miejscu zabiegu).
- Poddanie się w ostatnich 9 miesiącach zabiegom polegającym na ostrzykiwaniu toksyną botulinową (np. Botox) (w miejscu zabiegu).
- Stosowanie kortykosteroidów (w miejscu zabiegu).
- Choroby autoimmunologiczne (np. HIV, toczeń i inne).
- Choroby nowotworowe.
- Guzy, guzki niewiadomego pochodzenia.
- Ciąża.
- Okres laktacji (okres karmienia piersią).
- Podwyższona temperatura ciała.



# Pielęgnacja i konserwacja

- Po zakończeniu zabiegu usuń resztki preparatu z głowicy.
- Umyj **PC EYE GOLD 24 K** pod bieżącą wodą.
- Przetrzyj chusteczką nasączoną preparatem antybakteryjnym (np. spirytus salicylowy 2%).
- Odłóż urządzenie do pudełka.



Przechowuj urządzenie czyste i suche.





## Centrum Operacyjno-Rozwojowe Perfect Coll Sp. z o.o.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (lok. A 210)  
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia



[kontakt@perfect-coll.pl](mailto:kontakt@perfect-coll.pl)



+48 58 698 22 44



[www.perfect-coll.pl](http://www.perfect-coll.pl)

